



VITA® A2

Färbeflüssigkeiten-Empfehlung
am Beispiel der Farbreferenz VITA® A2




gräulicher



rötlicher



gräulicher

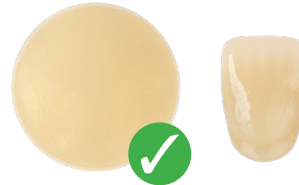

rötlicher



gräulicher



rötlicher



gräulicher



gelblicher



Empfehlung



Farbkonzept
(Farbton/Sättigung): Intensives Chroma, höherer Grauwert
Helligkeit: WENIGER Helligkeit
DD-Empfehlung: Minimalschichtung (cut back), Vollverblendung,
Kombination beider Techniken

Farbkonzept (Farbton/Sättigung): Weniger intensives Chroma, wärmerer Farbton
Helligkeit: MEHR Helligkeit

DD-Empfehlung: Baseinfärbung mit dem jeweils empfohlenen DD Pro Shade.
Weitere Charakterisierung: Bei monolithischen Kronen/Brücken aus DD cubeX2® oder DD cube ONE®
eine individuelle Bemalung (DD contrast® color and form concept) oder Minimalschichtung (cut back).
Bei Konstruktionen aus DD Bio ZX2 oder DD Bio Z eine keramische Verblendung.