


DD Solid Link Befestigungssystem – Dentallabor



Das DD Solid Link Befestigungssystem ist eine Komplettlösung für Labore und Zahnarztpraxen für die permanente Befestigung aller gängigen Dentalmaterialien. DD Uni Bond ist für alle Materialien, außer PMMA geeignet. Bitte geeigneten PMMA Haftvermittler verwenden.

Optional: Farbauswahl

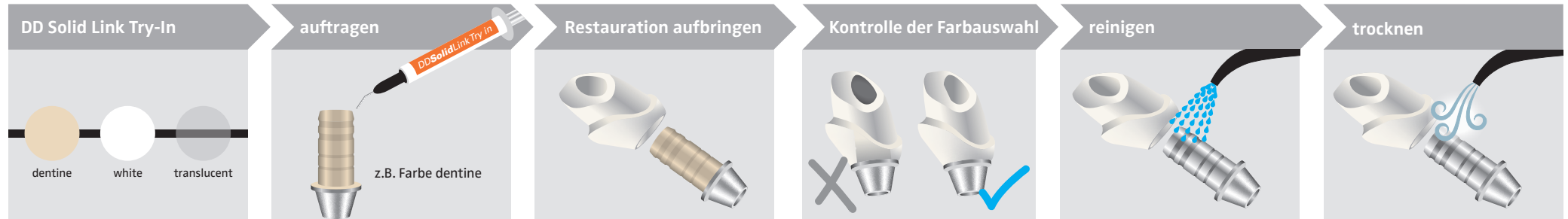

1. Konditionierung Titanbasis

vorbereiten

Klebebasis laut Herstellerangaben reinigen und vorbereiten. Die zu verklebende Fläche muss frei von Verunreinigungen und fettfrei sein. Wir empfehlen den Schraubenkanal vor dem Verkleben zu schließen.

2. Konditionierung Abutment/Restauration

vorbereiten


Restauration laut Herstellerangaben reinigen und vorbereiten.

3. Befestigung

DD Uni Bond auftragen

60 s einwirken lassen


trocknen

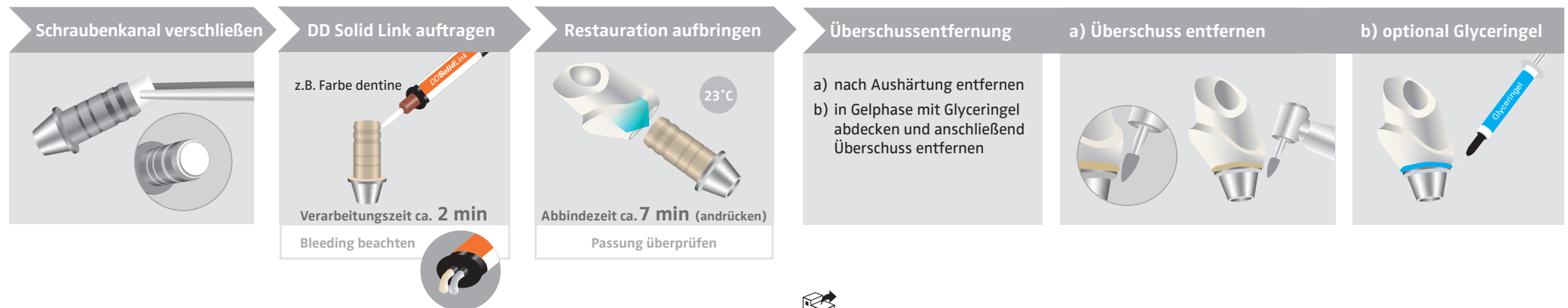

DD Solid Link Befestigungssystem – Zahnarztpraxis

Das DD Solid Link Befestigungssystem ist eine Komplettlösung für Labore und Zahnarztpraxen für die permanente Befestigung aller gängigen Dentalmaterialien. DD Uni Bond ist für alle Materialien, außer PMMA geeignet. Bitte geeigneten PMMA Haftvermittler verwenden.


Optional: Farbauswahl

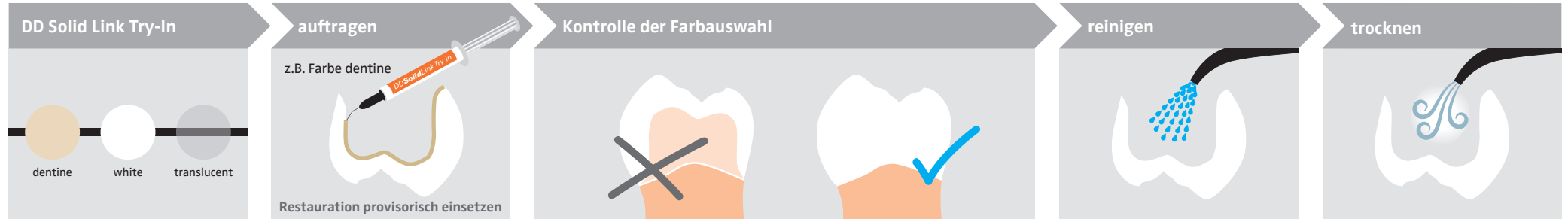

1. Konditionierung Zahn



2. Konditionierung Restauration

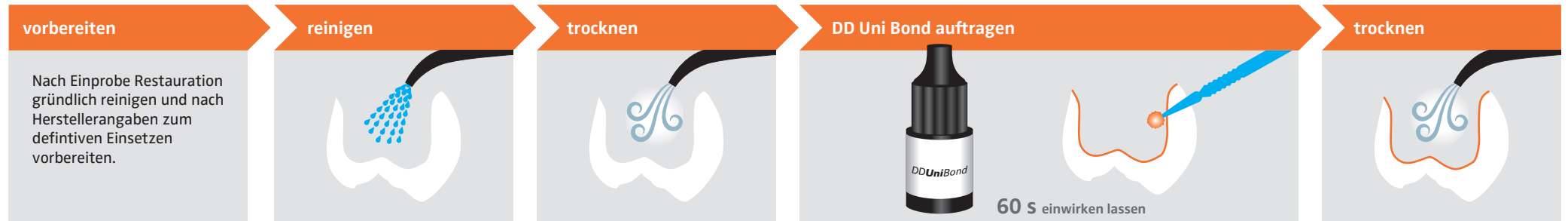

3. Befestigung

